





- Paciente intubado ou em terapia de alto fluxo selecionar modo invasivo.
- Paciente em Ventilação Não Invasiva com uso de máscara selecionar modo não invasivo.

**Nota: Para pacientes neonatos utilizar somente o modo invasivo.**

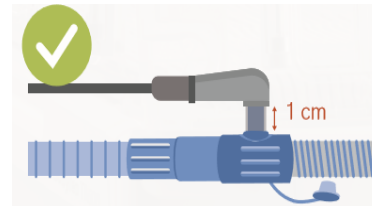


- Sensor proximal bem introduzido na posição vertical direcionado para cima, para evitar medidas erradas de temperatura caso haja condensação.

**Nota: Importante manter também o sensor distal bem introduzido.**

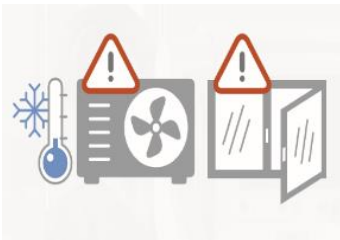


- Evitar posicionar o Babylog e o umidificador nas saídas de ar condicionado e ventiladores da unidade.
- Importante manter constante a temperatura do ambiente.

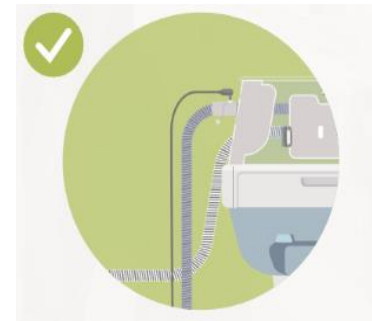


- O sensor de temperatura proximal ao paciente deve estar fora da incubadora, caso a temperatura da mesma seja maior que 34°C. Deve ser posicionado pelo menos 1 cm da saída da incubadora


**Nota: Utilizar a traqueia extensora somente nesta situação.**

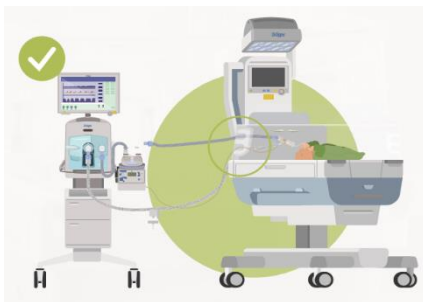

- Recomendado que o circuito não fique mais elevado que o paciente.
- Deve ser posicionado de forma lateralizada com o ramo inspiratório superior ao ramo expiratório.

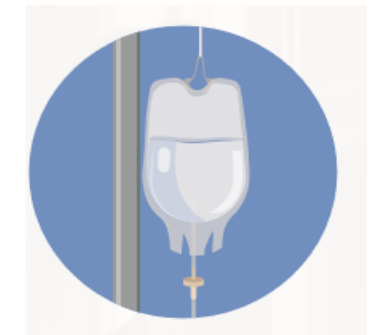

- O dreno expiratório deve estar horizontalizado e a drenagem do sistema deve estar incorporada à rotina da equipe multidisciplinar.

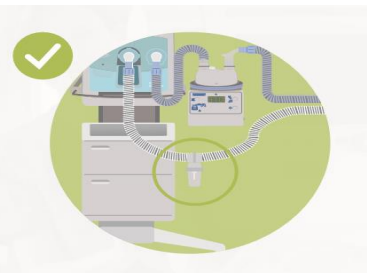

- Para funcionamento adequado do umidificador, é necessário manter constante o preenchimento do copo com água destilada.